


Brugsanvisning

Dato: 10-09-2019
Sag: S-181221-5
Udarbejdet af FL

Ansvarlig fabrikant: Danish Healthcare Design A/S

Maskine: Hæve-sænkebord

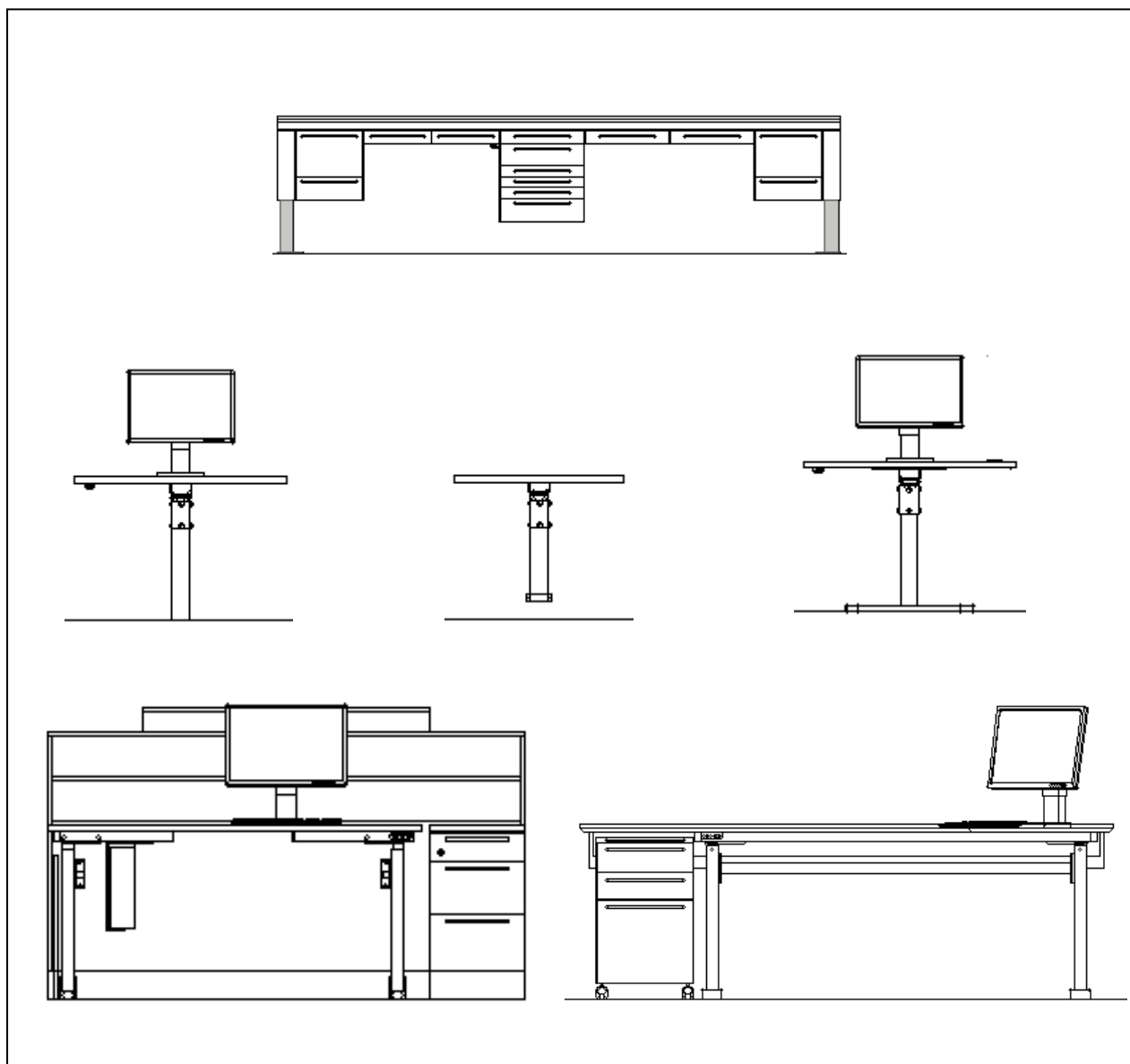

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	3
2.	Oversigt og anvendelse	4
2.1.	Generel beskrivelse	4
2.2.	Maskinens formål og tilsigtet/ beregnet anvendelse	4
2.2.1.	IKKE tilladt brug	4
3.	Sikkerhed og restrisici	4
3.1.	Advarsel om forudseeligt forkert brug	4
3.2.	Advarsler og informationer	4
3.3.	Restrisici	4
4.	Betjening	5
4.1.	Vedligeholdelsespersonale	5
4.1.1.	Specifikationer for reservedele	5
4.1.2.	Sikker udskiftning af reservedele	5
4.2.	Serviceadresser	5
5.	Tekniske data	5
5.1.	Tekniske specifikationer	5
5.1.1.	Fysiske dimensioner	5
5.1.2.	Støj.....	6
5.1.3.	Levetid	7
6.	Håndtering, transport og installation	7
6.1.	Transport.....	7
6.2.	Montage og installation	7
6.2.1.	Fastgørelse	7
7.	Ophør af brug	7
7.1.	Skrotning.....	7
7.2.	Fabrikant.....	7
7.3.	Maskinens betegnelse	7
7.4.	Maskinskilt	7
8.	Bilag	8
8.1.	EF-overensstemmelseserklæring	8
8.2.	Tegninger, mekanisk konstruktion	8
8.3.	Øvrige overensstemmelses- eller inkorporeringserklæringer	8

1. Indledning

Original brugsanvisning

Denne brugsanvisning er Danish Healthcare Design A/S's originale brugsanvisning til hæve-sænkeborde (herefter kaldet maskinen).

Formål

Formålet med denne brugsanvisning er at sikre korrekt installation, brug, håndtering og vedligeholdelse af maskinen.

Tilgængelighed

Brugsanvisningen skal opbevares på et for personalet kendt sted, hvor den er let tilgængelig for operatører og vedligeholdelsespersonale.

Kendskab

Det er arbejdsgiverens (maskinens ejer) forpligtelse at sikre, at alle, der skal betjene, servicere, vedligeholde eller reparere maskinen, har læst brugsanvisningen; som minimum de dele af den, der er relevante for deres arbejde.

Derudover har alle, der skal betjene, servicere, vedligeholde eller reparere maskinen, pligt til selv at søge informationer i brugsanvisningen.

2. Oversigt og anvendelse

2.1. Generel beskrivelse

Maskinen består af:

- Bordplade
- Aktuator
- Kontrolboks
- Betjeningspanel
- Frontpaneler

Hvis der laves ændringer på maskinen skal brugsanvisningen og risikovurderingen gennemgås igen, og rettes til, hvis nødvendigt.
Kontakt os for at hjælpe hertil.

2.2. Maskinens formål og tilsigtet / beregnet anvendelse

Hæve-sænkebord til klinikbrug og kontorbrug. Betjenes med hold to run knap.

Anvendelse:

Maskinen må kun anvendes til hæve- og sænke bord

2.2.1. IKKE tilladt brug

Maskinen må ikke anvendes til andet end det ovenfor beskrevne formål.

Det er ikke tilladt at sidde eller stå på bordet.

Bordet må ikke betjenes af børn.

3. Sikkerhed og restriktioner


3.1. Advarsel om forudseeligt forkert brug

Bordet må ikke bruges som "lift" for at løfte personer.

Bordet må ikke benyttes hvis sikkerhedsafskærmning/udstyr fjernes.

Må ikke hæves eller sænkes med personer på bordpladen.

3.2. Advarsler og informationer


	Fare for elektrisk stød
	Kontakt med farlige spændinger kan medføre alvorlig tilskadekomst og død. Før alle arbejder i stærkstrøms-området afbrydes strømmen!

3.3. Restriktioner

Risiko for klemning når bord køres op/ned og samtidig er placeret i skranke/reception/kontor/klinik hvor andre kan placere fingre hen over kanten på skranken/receptionen/bord.

4. Betjening

Hæve- sænkefunktion betjenes ved hold to run knap.

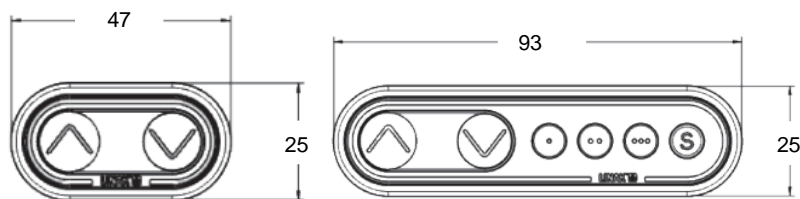

Bordet vil stoppe, hvis der opstår modstand på 40 kg. ved nedkørsel hvis f.eks. en stol kommer i klemme.

Gem en memoryposition:

- Kør bordet til den ønskede position med piletasterne
- Tryk på **S**-knappen
- Indenfor to sek. trykkes der på den ønskede tast med prikker (memory 1,2 eller 3)

Kør til en gemt position:

- Tryk på tasten med den ønskede memoryposition og systemet vil køre til den gemte position. Hold tasten inde til bevægelsen stopper i den gemte position.

Nulstil søjle/søjlerne:

- Dette gøres ved at køre søjlerne i bundposition. Knappen holdes inde i ca. 10 sek. Så vil søjle/søjlerne bevæge sig et lille nøk ned og op, så er bordet nulstillet.

Hvis der opstår fejl/skævhed på systemet, kan dette afhjælpes ved nulstillesøjlerne

4.1. Vedligeholdelsespersonale

Reparationer og vedligeholdelse skal foretages af uddannet personale. Strømmen skal altid afbrydes ved reparationsarbejde.

4.1.1. Specifikationer for reservedele

Henvendelse til Danish Healthcare Design A/S

4.1.2. Sikker udskiftning af reservedele

Foretages af uddannet personale.

4.2. Serviceadresser

Danish Healthcare Design A/S
Drejøvej 8
DK-9500 Hobro

5. Tekniske data


5.1. Tekniske specifikationer

5.1.1. Fysiske dimensioner

Enkeltstående med bordplade: længde =	700mm.	800mm.	900mm.	1000mm.
Bordplade dybde = 490/500mm. = totalvægt:	19 kg.	20 kg	21 kg.	22 kg.
Bordplade dybde = 600/615mm. = totalvægt:	20 kg.	22 kg.	23 kg.	24 kg.

Hæve-sænkestel fritstående med 2 søjler: længde =	1100mm.	1400mm.	1700mm.	2000mm.
Bordplade dybde = 490/500mm. = totalvægt:	36 kg.	39 kg	42 kg.	44 kg.
Bordplade dybde = 600/615 = totalvægt:	38 kg.	41 kg.	45 kg.	49 kg.
Bordplade dybde = 700 = totalvægt:	39 kg.	44 kg.	48 kg.	52 kg.
Bordplade dybde = 1000 = totalvægt:	46 kg.	52 kg.	58 kg.	65 kg.

Tyngdepunktets beliggenhed.

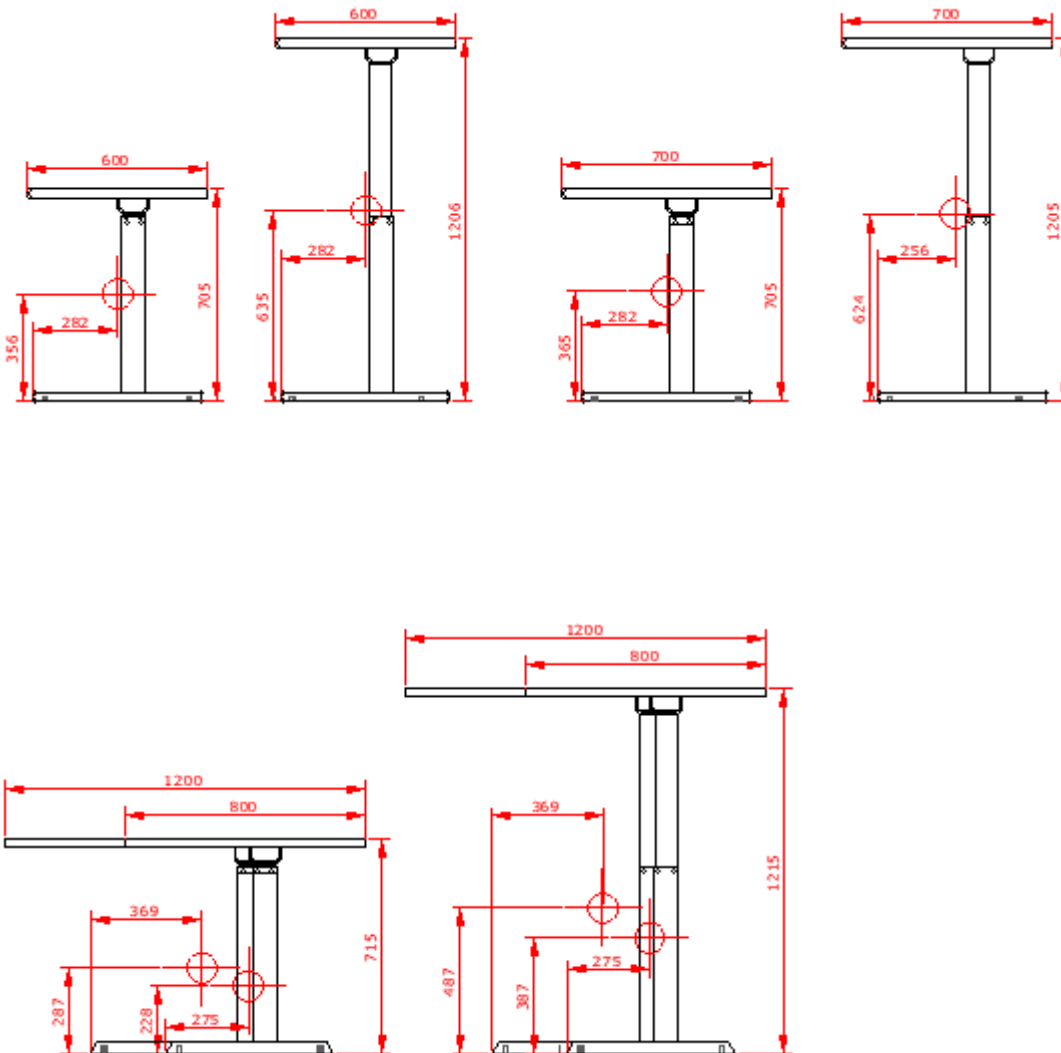

5.1.2. Støj

Maskinen støjer under 55 dB(A)

5.1.3. Levetid

Maskines elektriske sikkerhedsrelaterede dele har en forventet levetid på 20 år.

6. Håndtering, transport og installation

6.1. Transport

Transporteres i originalemballage.

6.2. Montage og installation

Bordet skal monteres i henhold til monterings anvisning.

6.2.1. Fastgørelse

Det skal sikres at dette er udført efter monteringsvejledningen af hensyn til bordet stabilitet.

7. Ophør af brug

7.1. Skrotning

I henhold til gældende miljøregler

7.2. Fabrikant

Maskinen er fremstillet af:

Danish Healthcare Design A/S
Drejøvej 8
DK-9500 Hobro

7.3. Maskinens betegnelse

Maskinens fulde betegnelse er enten:

1. 1-søjlet fast H/S
2. 1-søjlet fritstående H/S
3. 2-søjlet fast H/S
4. 2-søjlet fritstående H/S
5. 3-søjlet fast H/S
6. 3-søjlet fritstående H/S

7.4. Maskinskilt

Placeret på ydersiden af stel.

		Danish Healthcare Design A/S Drejøvej 8 DK 9500 Hobro Tlf. +45 98 5116 33		 	
Betegnelse:	2-søjlet fritstående H/S				
Fremstillingsår:	2019				
Serie nr.	200000 - 0001				

8. Bilag

8.1. EF-overensstemmelseserklæring

EF-overensstemmelseserklæring

2006/42/EF bilag II A

Fabrikant og samler af det tekniske dossier:

Navn Danish Healthcare Design A/S
 Adresse Drejøvej 8
 Postnr. og by DK-9500 Hobro

Erklærer hermed at maskine type:

- Hæve-sænkebord

Er fremstillet i overensstemmelse med følgende EF direktiver:

- 2006/42/EF Maskindirektivet

under anvendelse af følgende harmoniserede standarder:

- DS/EN 527-2:2016 - Kontormøbler – Arbejdsborde – Del 2: Styrke, holdbarhed og sikkerhedskrav

Frank Dahl Linde
 Underskriver

Kvalitetschef
 Stilling

Hobro
 Sted

01-08-2019
 Dato

8.2. Tegninger, mekanisk konstruktion

Se ordretegning

8.3. Øvrige overensstemmelses- eller inkorporeringserklæringer

Se Linak's hjemmeside <https://www.linak.dk/>